


RAIZER® Korte Handleiding

NL Versie 1.1

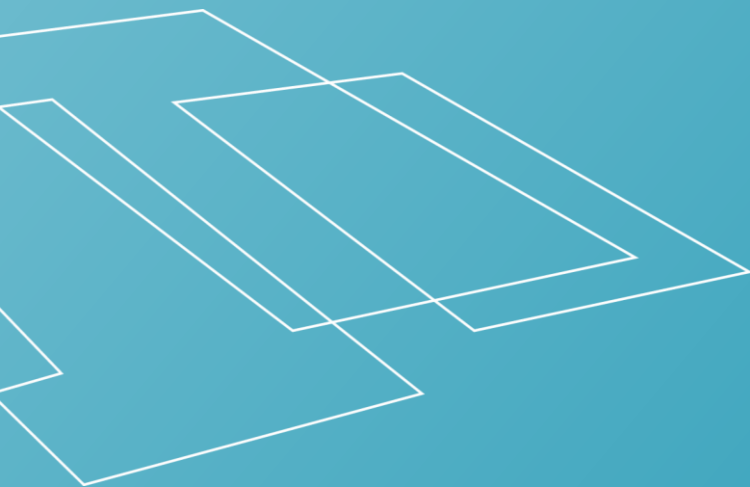


1




Benader de
liggende persoon.

2

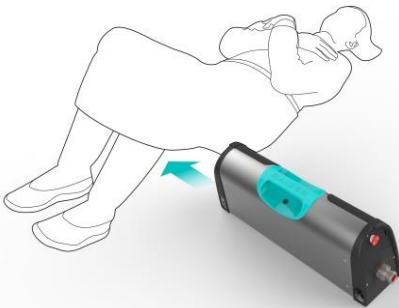

Plaats de stoel naast de
persoon op de grond.
Til de bovenbenen van
de persoon op tot een
hoek positie.
Duw de stoel
voorzichtig onder de
bovenbenen tegen het
zitvlak.

3

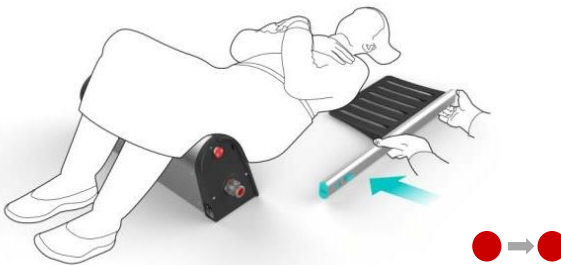


Draai de schouder van
de persoon door
zachtjes tegen de
elleboog te duwen.
Duw de rugsteun
(rood gemarkeerd voor
de linkerkant) onder de
schouders van de te
helpen persoon.

4



Schuif de rugsteun in
de stoel en klik de
steun vast.
Hou het zitje
eventueel vast met uw
voet zodat het niet
verschuift.

Duw de achterste
poot (rood voor
linkerkant) op de
stang en klik het
vast.

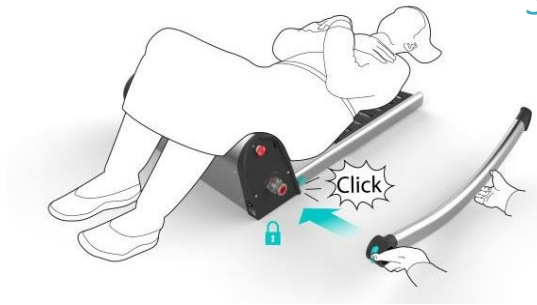

5

Duw de voorste
poot (rood voor
linkerkant) in
de stoel en klik
het vast.
Het kliksysteem
moet naar
buiten gericht
zijn.



6

Herhaal.

Groen
markering=
rechterkant




7

Stoel
bedienings
knoppen



8

9

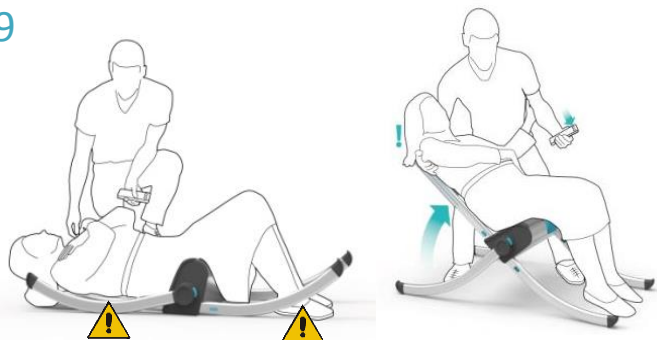

Gebruik één hand om de nek van de persoon te ondersteunen. Druk op de 'knop omhoog' op het paneel aan de zijkant of op de afstandsbediening.  Let op: zorg dat niets bekneld raakt

10



Het apparaat zal automatisch stoppen als de persoon in een zittende houding is.

11



Breng het apparaat in horizontale stand en demonteer.



Niet onder waterstraal plaatsen!



#1: 9 kg.
#2: 4 kg.



Til vermogen



40 - 100 lifts met volle accu.